


## ((راهنمای استفاده از دستگاه))

### الکتروشوک مدل Zoll

#### ۱- روش تخلیه شوک الکتریکی :

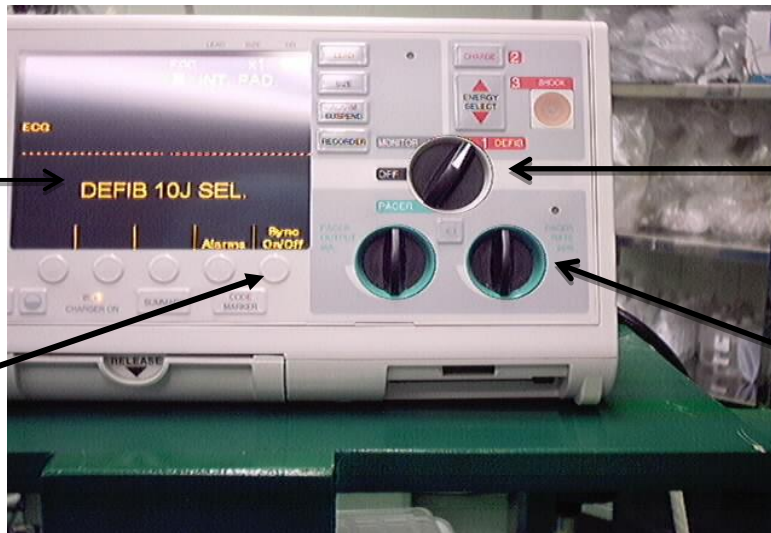

نشان دادن حالت  
دستگاه و میزان شارژ

دکمه تغییر حالت  
بین دفیلاتور و  
کاردیورژن

سوئیچ تغییر حالت بین  
مانیتور  
الکتروشوک  
پیس میکر  
خاموش کردن دستگاه

کلید های تنظیم انرژی  
و ریت پیس میکر

۱. ابتدا وجود دیس ریتمی در بیشتر از یک لید تأیید گردد

۲. پدال مناسب را انتخاب کنید

۳. دگمه مربوط به تنظیم انرژی را روی مقدار مورد نظر قرار دهید.



شارژ

انتخاب انرژی

تخلیه انرژی

۴. پدال های دستگاه الکترشوک را در دست بگیرید : در دست راست پدال مربوط به Apex و در دست چپ پدال مربوط به Sternum

۵. به میزان ۲ میلیمتر سطح پدال ها را با ژل لوبریکنت اغشته کنید

۶. پدال ها را روی قفسه سینه بیمار در محل صحیح قرار دهید.

۷. پدال ها را با نیرویی برابر با ۸kg روی قفسه سینه بیمار فشار دهید.

۸. جهت دادن شوک اعلام آمادگی کنید.

✓ سریعا مشاهده کنید که هیچیک از افراد احیاگر با بدن بیمار در تماس نباشند

✓ توجه کنید که رابط اکسیژن از بیمار جدا شده باشد.


۹. دگمه شارژ دستگاه را فشار دهید.

۱۰. پس از شنیدن صدای بوق مربوط به شارژ کامل دستگاه بطور همزمان دگمه های تخلیه

روی پدال ها را توسط انگشت شست فشار دهید.

۱۱. سریعا صفحه مانیتورینگ را از نظر تغییرات حاصله مشاهده نمایید.

✓ ماساژ قلبی را برای ۵ سیکل ادامه دهید و آنگاه در صورت نیاز شوک بعدی داده شود.

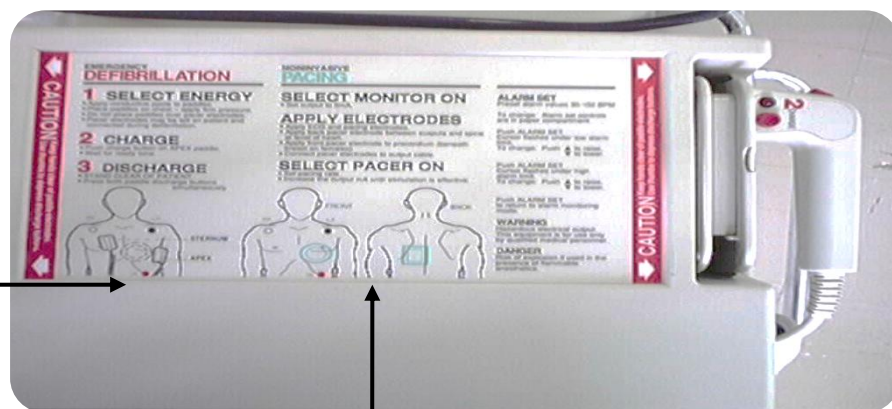

طرز  
قرارگیری  
پدال ها  
بصورت  
استاندارد

طرز قرارگیری پدال ها بصورت  
قدامی-خلفی

تهیه و تنظیم: سید مسلم مهدوی